



EUGENOL

EUGENOLUM PURUM

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ !

Skład :

Eugenol

Zastosowanie :

Składnik past do wypełniania kanałów korzeniowych lub opatrunków czasowych – najczęściej w połączeniu z tlenkiem cynku. Strącalnik przy łapisowaniu.

Sposób użycia :

Mieszymy do konsystencji pół-płynnej pasty / wypełnienia kanałów / lub gęstej pasty przy opatrunkach czasowych.

Środki ostrożności:

Ze względu na drażniące działanie unikać kontaktu preparatu z oczami, śluzówką jamy ustnej i skórą. Miejsca przypadkowego kontaktu zaleca się przepłukać dużą ilością wody. W przypadku spożycia nie powodować wymiotów, pić dużo wody i w razie konieczności skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Stosować koferdam, rękawiczki, okulary oraz odzież ochronną podczas pracy z preparatem.

Przeciwwskazania :

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na składniki preparatu oraz u kobiet w ciąży. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie z wypełnieniami kompozytowymi.

Przechowywanie :

Przechowywać w temperaturze pokojowej - nie przekraczać 25 stopni C.

Nie przekraczać daty przydatności do użytku podanej na opakowaniu. Po każdym użyciu szczelnie zamykać opakowanie. Chronić przed światłem.

Postępowanie z opakowaniami :

Zużyte opakowania utylizować lub zwrócić producentowi.

Zawartość :

Buteleczki 10 ml z zakraplaczem.

Termin ważności :

2 lata od daty produkcji.

PREPARAT DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE W STOMATOLOGII.

FIRMA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UŻYCIA PREPARATU NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI 06.01.2014



95-200 PABIANICE, UL. Olsza 10/12
TEL/FAX 42-213 06 37 KOM 510 218 910

WWW.CHEMIDENTAL.PL

