



KWAS CYTRYNOWY 40%

PŁYN DO PŁUKANIA KANAŁÓW KORZENIOWYCH

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ !

Skład :

Kwas cytrynowy – 40% roztwór wodny.

Zastosowanie :

Wspomaganie mechanicznego poszerzania kanałów korzeniowych, usuwanie warstwy mazistej, resztek miazgi i zanieczyszczeń z opracowywanego kanału. Odsłanianie kanałików zębinowych.

Sposób użycia :

PRZED UŻYCIEM WSTRZĄSNAĆ !

Płukać obficie kanał za pomocą strzykawki i igły endodontycznej z otworem bocznym. Unikać nadmiernego ciśnienia płynu, mogącego po przedostaniu się przez otwór wierzchołkowy prowadzić do podrażnień tkanek około-wierzchołkowych. Po ostatnim płukaniu preparatem jego resztki wypłukać roztworem soli fizjologicznej.

Środki ostrożności:

Ze względu na drażniące działanie unikać kontaktu preparatu z oczami, śluzówką jamy ustnej i skórą. Miejsca przypadkowego kontaktu zaleca się przepłukać dużą ilością wody. W przypadku spożycia nie powodować wymiotów, pić dużo wody i w razie konieczności skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Stosować koferdam, rękawiczki, okulary oraz odzież ochronną podczas pracy z preparatem.

Przeciwwskazania :

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na składniki preparatu.

Przechowywanie :

Przechowywać w temperaturze pokojowej do 25 stopni C, we właściwie oznaczonych i szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Nie przekraczać daty przydatności do użytku podanej na opakowaniu. Po każdym użyciu szczelnie zamykać opakowanie.

Postępowanie z opakowaniami :

Zużyte opakowania utylizować lub zwrócić producentowi.

Zawartość :

Butelki PE 200 lub 400 ml

Termin ważności :

Na opakowaniu.

PREPARAT DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE W STOMATOLOGII.

FIRMA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UŻYCIA PREPARATU NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI 06.01.2014



95-200 PABIANICE, UL. Olsza 10/12

TEL/FAX 42-213 06 37 KOM 510 218 910

WWW.CHEMIDENTAL.PL



