

2% DIGLUKONIAN CHLORHEXYDYNY

PŁYN DO PŁUKANIA KANAŁÓW KORZENIOWYCH
PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ !

Skład :

Diglukonian chlorhexydyny, woda.

Zastosowanie :

Wspomaga mechaniczne poszerzanie kanałów korzeniowych, usuwanie resztek miazgi i zanieczyszczeń z kanału korzeniowego. Ma właściwości antybakteryjne i dezynfekujące.

Sposób użycia :

Płukać obficie kanał za pomocą strzykawki i endodontycznej igły z otworem bocznym.

Unikać nadmiernego ciśnienia płynu, mogącego po przedostaniu się przez otwór wierzchołkowy prowadzić do podrażnień tkanek około-wierzchołkowych.

Środki ostrożności:

Ze względu na drażniące działanie unikać kontaktu preparatu z oczami, śluzówką jamy ustnej i skórą. Miejsca przypadkowego kontaktu zaleca się przepłukać dużą ilością wody. W przypadku spożycia nie powodować wymiotów, pić dużo wody i w razie konieczności skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Stosować koferdam, rękawiczki, okulary oraz odzież ochronną podczas pracy z preparatem. UWAGA! Po płukaniu kanału roztworem podchlorynu sodu i przed płukaniem roztworem diglukonianu chlorhexydyny zalecane jest płukanie roztworem soli fizjologicznej, aby niedopuszcząć do wytrącania się brunatnego osadu.

Przeciwwskazania :

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na składniki preparatu.

Przechowywanie :

Przechowywać w temperaturze pokojowej do 25 stopni C, we właściwie oznaczonych i szczelnie zamkniętych pojemnikach. Nie przekraczać daty przydatności do użytku podanej na opakowaniu. Po każdym użyciu szczelnie zamykać opakowanie.

Postępowanie z opakowaniami:

Zużyte opakowania utylizować lub zwrócić producentowi.

Zawartość :

Butelki PE 200 lub 400 ml

Termin ważności :

2 lata od daty produkcji.

PREPARAT DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE W STOMATOLOGII.

FIRMA NIE ODPOWIADA ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU UŻYCIA PREPARATU
NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ.

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI 06.01.2014



